

Ersatzteile für den Sensorkopf des VarioSwitch Atemsensorgerätes

Produkt	Materialnummer	Ergänzung
Ersatz-Membran-Set	210.216.910	3-teiliges Set, bestehend aus hochempfindlicher Ersatz-Membran, Leuchtring und Schutzblende (10er Pack)
Ersatz-Kugelkopf	210.216.901	desinfizierbar
Bedienungsanleitungen	LE218	Atemsensor, Ausführung mit Drahtanschluss
	LE321	Atemsensor, Ausführung mit Funk
	LE217	Atemsensor, Kurzanleitung




Reinigen / Wechseln von Sensorkopf-Komponenten

Zur Durchführung der Maßnahmen das Gerät ausschalten, dann wie in dieser Anleitung beschrieben vorgehen. Nach der Ausführung unbedingt eine Funktionsüberprüfung des Gerätes entsprechend der Bedienungsanleitung durchführen.


Sensorkomponenten reinigen / wechseln

Bild 1: Kugelkopf abnehmen und aufsetzen

Abschrauben durch
Links-drehung



Wieder anschrauben
durch Rechts-drehung



Wichtig!
Zum Lösen / Anziehen des Kugelkopfs keine Zange oder andere, harte / scharfkantige Werkzeuge verwenden.

Hinter dem Kugelkopf befindet sich das Membran-Set². Dieses lässt sich zum Reinigen / Wechseln abnehmen. Beim wieder-Aufsetzen die Reihenfolge beachten und dass die glänzende Seite der Schutzblende zum Kugelkopf zeigt.


Bild 7: Membran-Set wechseln

Membran-Set lösen:

- Kugelkopf abschrauben,
- Membran-Set entnehmen
- Teile sorgfältig aufheben

Membran-Set montieren:

- Membran-Set in der gezeigten Reihenfolge in den Kugelkopf legen
- Mikrofonkapsel in den Ring schieben
- Kugelkopf vorsichtig am Schwanenhals anschrauben

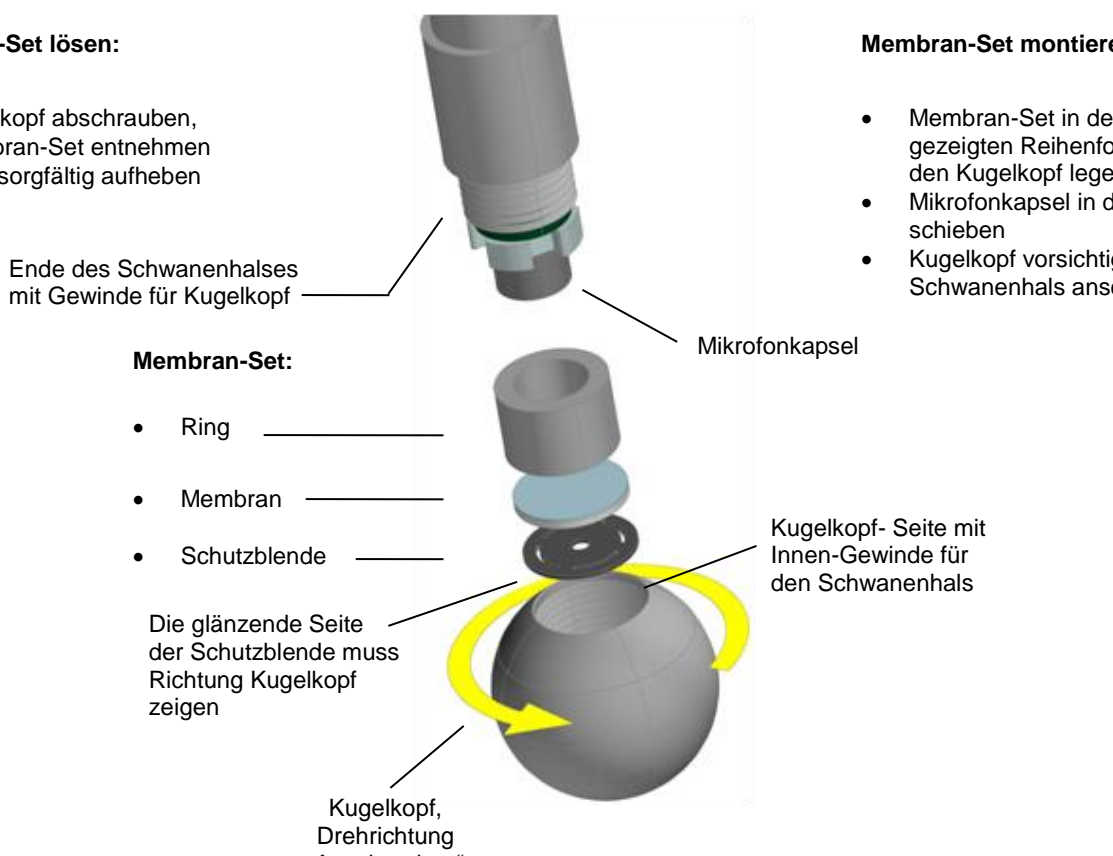

²Der Kugelkopf gehört nicht zum Membran-Set

