

Warnung



Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Das Rufgerät bietet Unterstützungskomfort und ermöglicht es, Beobachtungszeiträume zu verlängern. Das System ist regelmäßig auf Funktion zu kontrollieren. Bei Störungen und fehlerhaftem Verhalten darf das System bis zur Kontrolle durch eine sachkundige Person nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die beiliegenden Anleitungen und heben diese auf.

Wichtig: Dieses Gerät darf nicht zur Überwachung bei vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen eingesetzt werden.

Tabelle 1: Lieferumfang

Produkt	Materialnummer	Ergänzung
MediTouch-AP Großflächen-Balgtaster Klemme	990.346.00	Klemmanschluss
Bedienungsanleitung	LE394	

Tip: Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.

Hinweis: In dieser Beschreibung wird der „MediTouch-AP Großflächen-Balgtaster“ abgekürzt als **MediTouch-AP** bezeichnet.

Ausführungen

In dieser Anleitung sind die Ausführungen mit Klemmanschluss zur Anbindung von Rufsystemen beschrieben. Die Montage erfolgt auf einer 55er Schalterdose. Für Ausführungen mit integriertem Funksender gilt die Bedienungsanleitung LE393.


Funktionen

Der **MediTouch-AP** löst durch Berühren des roten Balgs einen Ruf aus. Die am oberen Rand sichtbare LED-Anzeige, wie in Bild 1 dargestellt, leuchtet als nächtliches Findelicht ständig schwach rot. Im Falle eines Rufes leuchtet diese Anzeige hell rot als Beruhigungslicht. Für Anwendungen ohne Beruhigungslicht wie z.B. beim Einsatz als automatischer Türöffner kann die Anzeige gebrückt werden.

Platzierung

Das Gerät so anordnen, dass es von den nutzenden Personen leicht erreicht werden kann.


Bild 1: MediTouch-AP Großflächen-Balgtaster

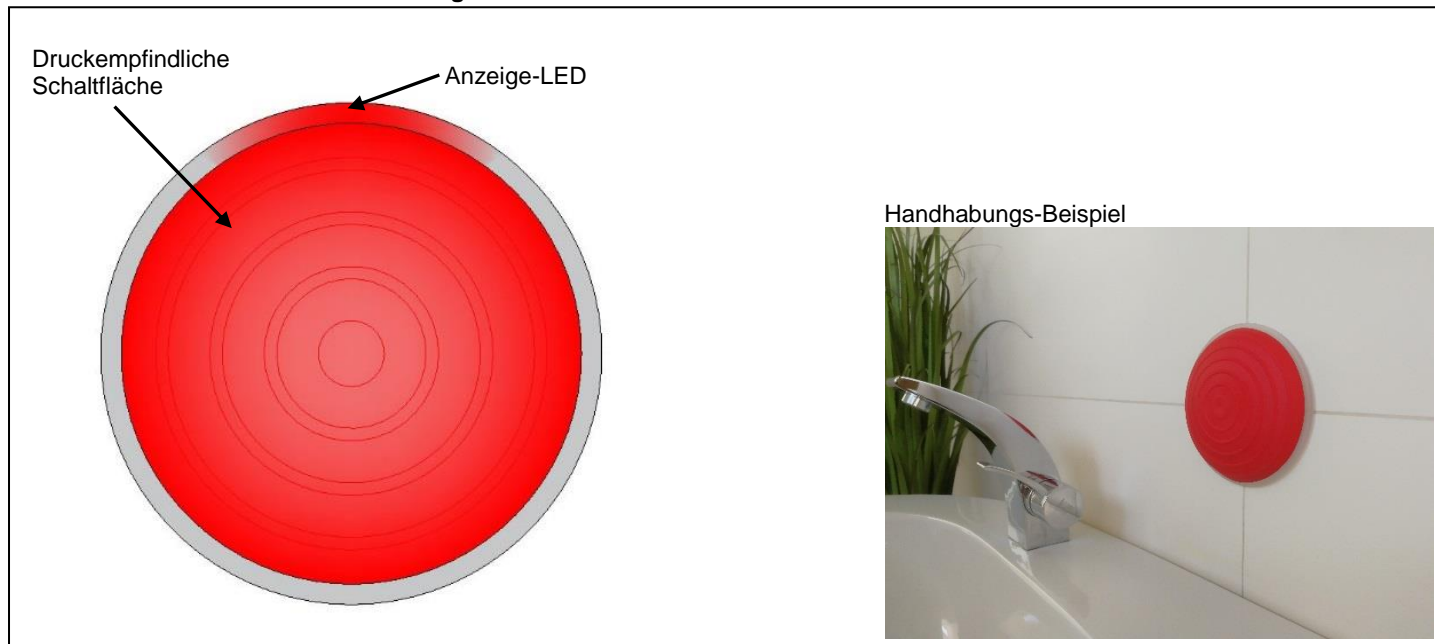

Anschluss an das Rufsystem

Auf der Rückseite des MediTouch-AP befindet sich eine Klemmleiste zum Anschluss an ein Ruf- oder Meldesystem.

Bild 2: Anschaltbelegung

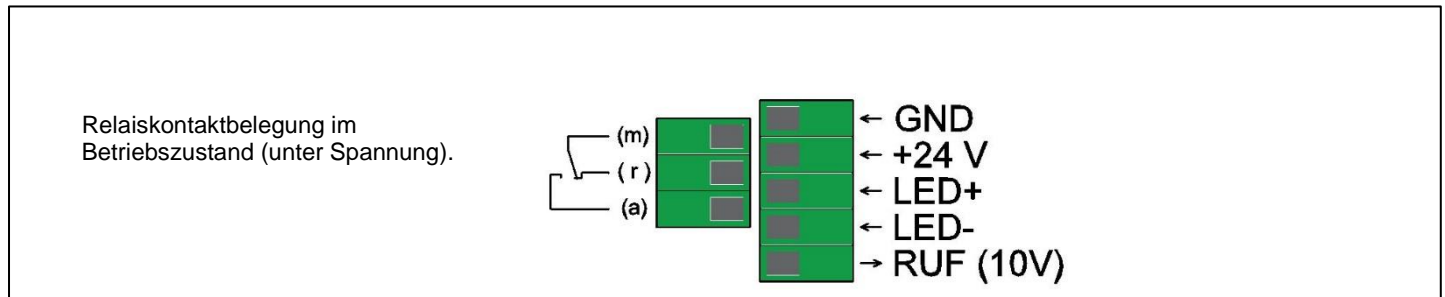

Finde- / Beruhigungslicht

Zeitverhalten: Das Gerät gibt als Ruf eine Kontaktmeldung für ca. 2 Sek. aus. Normalerweise wird eine Meldung parallel mit der LED angezeigt. Da diese LED-Anzeige vom Rufsystem gesteuert wird, ist deren Funktion jedoch vom Rufsystem abhängig.

Rufmeldung abstellen

Der **MediTouch-AP** gibt eine Rufmeldung an die Rufanlage. Diese Meldung wird von der Rufanlage weitergeleitet und gespeichert. Die gespeicherte Rufmeldung wird durch die Rufanlage wieder abgestellt.

Regelmäßige Maßnahmen

Vorgeschlagen wird mindestens eine wöchentliche optische Besichtigung mit Prüfref-Auslösung der Rufanlage.

Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel. Auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Nur Desinfektionsmittel gem. EN 16615 bzw. VAH-Liste anwenden.

Technische Daten

Ausführung:	Handtaster mit sehr leichtgängiger Großflächen-Sensorauslösung, besonders flache Ausführung.
Meldung:	Ausführungsvarianten Schließer / Öffner Optische Funktionsanzeige, extern angesteuert
Betriebsspannung:	DC 24V / 70 mA
Schutzart:	IP 44 (nicht in Nasszellen verwenden)
Klimaklasse:	K1 (häusliche Umgebung Innenraum)
Druckfläche:	Ø 90 mm
Abmessungen:	ca. Ø 110 x 35 mm (DxH)
Gewicht:	ca. 290 g

Wichtig

Das Produkt darf nur an Rufanlagen betrieben werden, bei denen die Betriebsspannungen zum Großflächentaster als sichere Kleinspannung (SELV) ausgeführt sind. Anm.: Dies ist für Rufanlagen nach DIN/VDE 0834 erfüllt. Zudem ist die maximale Zuführungsenergie in der Rufanlage auf 100 VA zu begrenzen.



Warnung

Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die Entflammbarkeit. Trotzdem sind rauchende Personen darauf hinzuweisen, dass das Produkt bei Kontakt mit Zigaretten in der Funktion eingeschränkt und / oder beschädigt werden kann!

Gewährleistung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen, oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen. Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff oder unsachgemäßer Behandlung. Sie gilt nicht für den Verschleiß beweglicher Teile.

Serviceadresse

Wenden Sie sich dazu an den Lieferanten Ihrer ruftechnischen Ausrüstung.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt Lehmann Electronic, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter www.lehmannweb.de.



REACH Verordnung Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.

