

Ersatzteile für den Sensorkopf des VarioSwitch Atemsensorgerätes

Produkt	Materialnummer	Ergänzung
Ersatz-Membran-Set	210.216.910	3-teiliges Set, bestehend aus hochempfindlicher Ersatz-Membran, Leuchtring und Schutzblende (10er Pack)
Ersatz-Kugelkopf	210.216.901	desinfizierbar



Reinigen / Wechseln von Sensorkopf-Komponenten


Zur Durchführung der Maßnahmen das Gerät ausschalten, dann wie in dieser Anleitung beschrieben vorgehen. Nach der Ausführung unbedingt eine Funktionsüberprüfung des Gerätes entsprechend der Bedienungsanleitung durchführen.

Sensorkomponenten reinigen / wechseln


Zur Reinigung der Sensorkomponenten nur Desinfektionsmittel gem. EN 16615 bzw. VAH-Liste anwenden. Auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Einen leicht feuchten weichen Lappen zur Reinigung verwenden.

Bild 1: Kugelkopf abnehmen und aufsetzen

Abschrauben durch
Linksdrehung



Anschrauben durch
Rechtsdrehung



Wichtig!
Den Kugelkopf handfest anziehen!
Zum Lösen / Anziehen des Kugelkopfs keine Zange oder andere, harte / scharfkantige Werkzeuge verwenden.

Hinter dem Kugelkopf befindet sich das Membran-Set¹. Dieses lässt sich zum Reinigen oder Wechseln abnehmen. Beim Zusammenbau ist die Reihenfolge zu beachten. Die glänzende Seite der Schutzblende muss Richtung Kugelkopf zeigen.


Bild 7: Membran-Set wechseln

Membran-Set lösen:

- Kugelkopf abschrauben
- Membran-Set entnehmen
- Teile sorgfältig aufheben

Membran-Set montieren:

- Membran-Set in der gezeigten Reihenfolge in den Kugelkopf legen
- Mikrofonkapsel in den Ring schieben
- Kugelkopf vorsichtig am Schwanenhals anschrauben

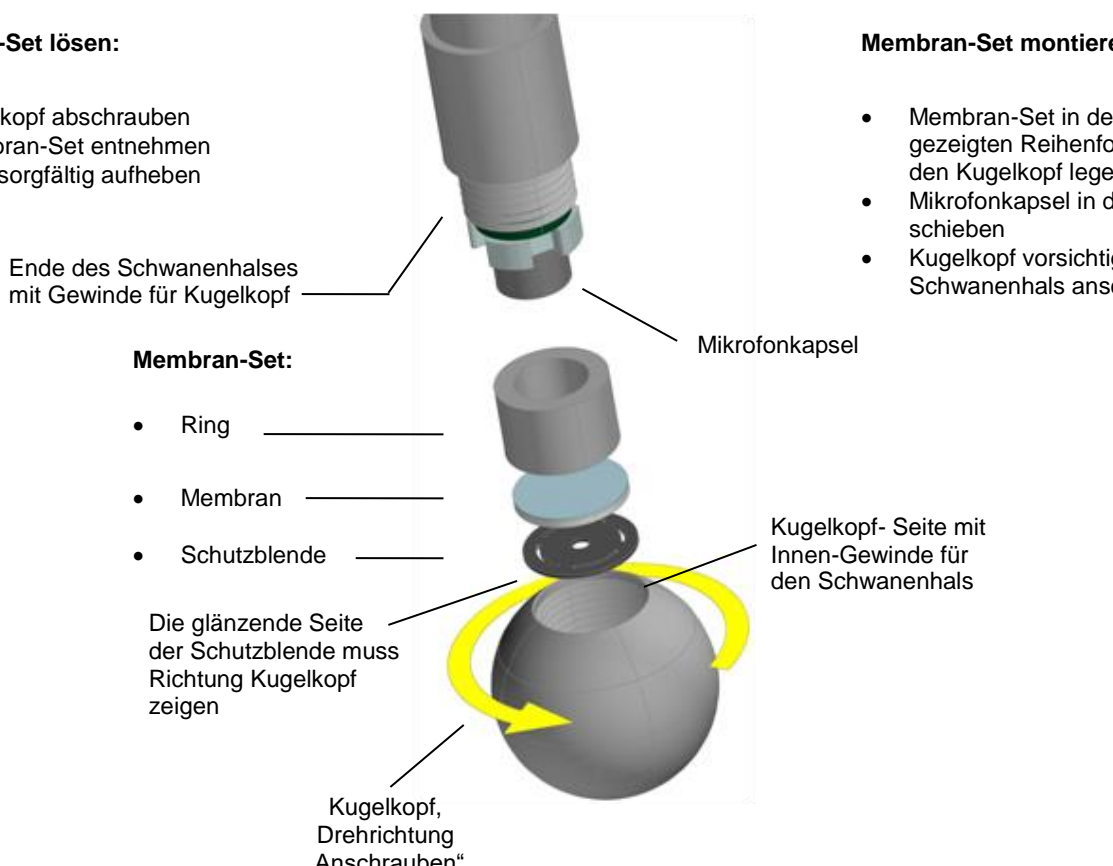

¹Kugelkopf und Membran-Set sind unterschiedliche Produkte mit eigenen Materialnummern!

